

# HYDRAFACIAL MD® DECOLLETE

## Протокол ухода за областью декольте

Общее время процедуры: до 40 минут.

### Шаг 1. Демакияж

*Длительность: 2 минуты.*

При помощи очищающего геля Activ™ Cleanser (расход: 2 мл) проводим тщательное очищение области декольте - удаляем загрязнения и подготавливаем к процедуре.

Характер движений: классический.

### Шаг 2. Эксфолиация

*Длительность: 6-10 минут.*

Этап может начинаться алмазной микродермабразией с насадками различной степени абразивности для максимального выравнивания рельефа кожи. Использование технологии особенно эффективно для пациентов, которые хотят дополнительно омолодить кожу зоны декольте.

После микродермабразии следует приступить к эксфолиации с использованием сыворотки. При помощи классической синей насадки и сыворотки Activ-4™ (расход: 8 мл) выполняем эксфолиацию и нежно убираем поверхностный слой и шелушения. Во время этапа происходит увлажнение кожи.

Характер движений: от груди вверх, движения быстрые, длинные, скользящие, внахлест (перекрытие до 40%).

Параметры вакуума: от 6 до 12.

Подача сыворотки: 25-30%

### Шаг 3. Кислотный пилинг

*Длительность: 2 минуты.*

Ампульный пилинг HydraFacial MD® наносится при помощи бирюзовой насадки для экстракции. На этапе используется один из пилингов: GlySal™ Prep 7,5%, GlySal™ Peel 15% или GlySal™ Peel MD 30% — в зависимости от задачи.

Во время этапа происходит увлажнение и отшелушивание. Использование пилинга также способствует увеличению глубины проникновения сывороток и бустеров, которые используются.

Характер движений: движения быстрые, отрывистые, морозящие.

Параметры вакуума: от 16 до 18.

Подача сыворотки: 35-40%

#### **Шаг 4. Экстракция** (при необходимости)

*Длительность: 10 минут.*

Насадка для экстракции бирюзовая, тщательно очищаем (убираем комедоны и очищаем поры от загрязнений).

Характер движений: движения медленные, пунктирные, внахлест.

Параметры вакуума: от 16 до 25.

Подача сыворотки: 35-40%.

#### **Шаг 5. Бустеры**

*Длительность: 2 минуты.*

Бустер Britenol® или CTGF наносится при помощи прозрачной насадки.

Britenol® содержит альфа-арбутин, гликолевую кислоту и другие активные компоненты, которые работают с пигментацией. CTGF – сыворотка с запатентованными факторами роста, которые усиливают регенерацию и обновляют кожу.

Характер движений: движения быстрые, отрывистые, морозящие.

Параметры вакуума: от 16 до 20.

Подача сыворотки: 35-40%

#### **Шаг 6. Гидратация**

*Длительность: 5 минут.*

На этапе используется прозрачная насадка и сыворотки Antiox-6™ или Antiox+™, благодаря которым происходит глубокое увлажнение зоны декольте.

Характер движений: движения быстрые, отрывистые, морозящие.

Параметры вакуума: от 16 до 18.

Подача сыворотки: 35-40%

## **Шаг 7. Завершение и защита**

*Длительность: 5 минут.*

В завершение ухода нанесите на руки увлажняющий крем PurMoist™ Oil-Free или UV Smart® Daily SPF 40 и легкими массажными движениями вбейте крем в кожу.

Характер движений: легкие, массажные.