

HYDRAFACIAL MD® LIPS

Протокол ухода для губ

Общее время процедуры: 12- 15 минут.

Шаг 1. Демакияж

Длительность: 1 минута

При помощи очищающего геля **Activ™ Cleanser** (расход 1 мл) проводим тщательный демакияж губ - удаляем губную помаду, блеск, подготавливаем губы к началу ухода HydraFacial MD®.

Характер движений: классический.

Шаг 2. Эксфолиация

Длительность: 4 минут

При помощи классической синей насадки и сыворотки **Activ-4™** (расход: 4 мл) выполняем эксфолиацию и нежно убираем все шероховатости и неровности.

Характер движений: линейный, от уголков губ к центру, движения быстрые, длинные, скользящие.

Параметры вакуума: от 14 до 18

Подача сыворотки: 20-35%

Шаг 3. Гидратация

Длительность: 4 минуты

На этапе используется прозрачная насадка и сыворотки **Antiox-6™** или **Antiox+™**, благодаря которым происходит глубокое увлажнение и питание губ, создается эффект легкого объема - «нацелованные губы».

Характер движений: отрывистые, морозящие.

Параметры вакуума: от 16 до 35

Подача сыворотки: 35-40%.

Шаг 4. Завершение и защита

Длительность: 2 минуты

В завершение ухода нанесите на губы **Perk™**, **ETX™** или средство для губ на ваше усмотрение. Также сразу после процедуры возможно использование помады или блеска для губ.

Характер движений: легкий