

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ

Lumicell
Wave 6



SPALAND INTERNATIONAL

ВЫБОР ЛИДЕРОВ



Mirotel
RESORT & SPA

FOUR POINTS
BY SHERATON

FOUR SEASONS
Hotels and Resorts

HYATT


Hilton
HOTELS & RESORTS



АППАРАТ LUMICELL WAVE 6

Инновационная разработка компании Silhouet-Tone® (Канада) для лечения целлюлита и коррекции фигуры. Обладатель престижной профессиональной награды Professional's Choice, которую ежегодно вручает американский журнал LNE & SPA'S, в категории Equipment – Body.

Аппарат объединяет пять самых эффективных технологий

- 1 Инфракрасный свет
- 2 Вакуумно-роликовый массаж
- 3 Ультразвуковая кавитация
- 4 Радиочастотная терапия
- 5 Безинъекционная мезотерапия

Инфракрасное излучение, ультразвук и радиоволны стимулируют активность бета-рецепторов адипоцитов, запускают процесс липолиза. Вакуумно-роликовый массаж ускоряет лимфоток, микроциркуляцию и выведение токсинов. Такое сочетание технологий обеспечивает выраженный и устойчивый результат уже после 4-й процедуры!

Производитель Silhouet-Tone (Montreal, Canada) уже более 45 лет демонстрирует премиальное качество, универсальные возможности и поистине востребованную высокотехнологичную продукцию.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большое количество алгоритмов процедур и лечение не только целлюлита, но и начальных стадий ожирения. Каждая технология работает отдельно, поэтому возможно подбирать индивидуальные программы, согласно анамнезу клиента.



Разнообразие насадок для работы с лицом и телом:

- две фотопневматических насадки для тела
- одна ультразвуковая манипула
- две радиочастотных манипулы
- две трансдермальных манипулы
- одна насадка для лица



Запатентованная вакуумно-роликовая манипула Plarm Touch™ не имеющая аналогов



Физиологичность

Lumicell Wave 6 является исключительно эффективной, атравматичной системой, специально разработанной для лечения целлюлита и моделирования силуэта

Во время лечения используются:

- инфракрасный фотопневматический массаж (длина волны инфракрасного излучения 900 нм)
- ультразвук частотой 1 МГц
- двухполярная радиочастотная терапия частотой 450 кГц
- безинъекционная мезотерапия (гальванический ток 1000 - 4000 мкА)



Выраженный эффект после четвертой процедуры



Синергизм механического и энергетического воздействий



Введение липолитиков противовоспалительных и увлажняющих средств



Сертифицирован UL, CSA (NRTL) и CE



Отсутствие дополнительных фильтров и защитных костюмов

Целлюлит по своей природе связан с физиологическими изменениями в гиподерме. Он может быть более глубоким или же более поверхностным. Lumicell Wave 6 способен справиться с различными стадиями целлюлита, нагревая кожу на разных тканевых уровнях.

▷ Лечение целлюлита

▷ Уменьшение и коррекция объемов

▷ Моделирование контуров тела

▷ Устранение дефектов кожи

▷ Послеоперационная реабилитация

▷ Снятие отечности



ТЕХНОЛОГИИ LUMICELL WAVE 6

Большое количество алгоритмов процедур и лечение не только целлюлита, но и начальных стадий ожирения. Каждая технология работает отдельно, поэтому возможно подбирать индивидуальные программы, согласно анамнезу клиента

1 | ИНФРАКРАСНЫЙ ФОТОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Основной принцип заключается в целенаправленной локальной подаче инфракрасного луча (900 нм, который нагревает кожу до 40°C) в пульсирующем вакуумном массаже. Эта технология увеличивает проницаемость клеточных мембран, не разрушая сами клетки, активизирует жировой метаболизм и липолиз. Жир быстро расщепляется и удаляется с кровотоком.

Способствует разволокнению фиброзно-рубцовой ткани, уменьшению внутреннего отека, повышению эластичности кожи за счет реваскуляризации и кардинального улучшения метаболизма клеток.

Пульсирующий вакуумный массаж увеличивает эластичность. В результате процедуры усиливается микроциркуляция, увеличивается скорость лимфотока и улучшаются метаболические процессы в тканях. Одновременно происходит стимуляция фибробластов и увеличивается выработка коллагена.

Глубина воздействия — 50 мм.
Лимфодренаж – это обязательное условие успешного лечения целлюлита.

Интенсивность и степень воздействия подбираются индивидуально по показаниям, в зависимости от стадии целлюлита (1-4) и степени тяжести индекса массы тела (ИМТ). Массаж проводится с использованием очень легкого масла, обогащенного антиоксидантами и увлажняющими компонентами.



2 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ

Это стабильная кавитация, которая нагревает более глубокие слои гиподермы, ускоряет расщепление и выведение жира, ослабляя устойчивость мембран. Ультразвуковая вибрация с частотой 1 МГц, мощностью 30W представляет собой более безопасный (в отличие от нестабильной кавитации) и физиологичный метод увеличения проницаемости мембран адипоцитов.

Это позволяет не перегружать организм токсинами и продуктами распада жиров. Высокочастотная кавитация улучшает локальную циркуляцию крови, лимфоток, эластичность тканей, метаболизм.

Использование ультразвука стимулирует расщепление жиров путем повышения норэпинефрина на площади воздействия и активации бета-рецепторов клеток.

Высокая интенсивность 2,4 Вт/см² позволяет проникать на глубину до 50 мм и оказывать дефибрирующее действие на соединительную ткань. Гиподерма нагревается до 50°C, что усиливает липолиз и способствует улучшению тонуса кожи.

Процедура выполняется по U-гелю, в состав которого входят липолитики (фосфотидилхолин, кофеин, карнитин, экстракт гуараны) и регенерирующие компоненты.



ТЕХНОЛОГИИ LUMICELL WAVE 6

3 | ТРАНСДЕРМАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛИПОЛИТИКОВ


В процессе лечения используют позитивный и негативный заряд для того, чтобы провести все компоненты препарата, что позволяет внедрить 99% вещества на глубину 1 см и 65% липолитиков — на глубину до 40 мм. Этому способствует особая последовательность высокоинтенсивных модулирующих импульсов с интенсивностью от 1000 до 4000 мкА.

Метод безинъекционной мезотерапии способствует сжиганию жировых отложений в более глубоких слоях кожи.

Для терапии используется проводящий гель, содержащий ионизируемые молекулы, которые под воздействием тока поляризуются. Сначала гель проникает в интерстициальное пространство, потом воздействует на целевые клетки. Когда баланс полярности обеих сторон мембраны достигнут, проникновение останавливается.

В состав геля входят активные липолитики (фосфатидилхолин, липаза), вещества, усиливающие микроциркуляцию и тонус (аргинин, экстракт хвоща полевого), а также лимфодренаж (экстракт вишневых черенков).

Это безболезненная и комфортная процедура, которая позволяет воздействовать на большую площадь без отека и покраснений.

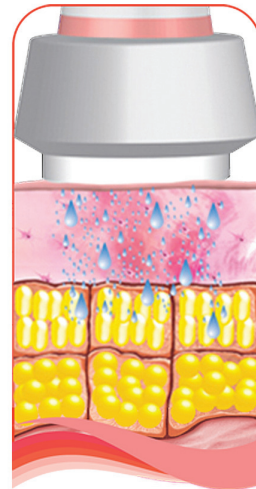

ТЕХНОЛОГИИ LUMICELL WAVE 6

4 | РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

Биполярное воздействие радиоволнами с частотой 450 кГц и максимальной мощностью до 100W позволяет осуществлять термолиполилиз или термолифтинг.

Глубина воздействия в биполярных системах равна примерно половине расстояния между электродами (до 50 мм). За счет изменения расстояния между электродами можно менять глубину воздействия.


Метод не подразумевает использование систем охлаждения и термоконтроля. Низкая частота воздействует на гиподерму, в которой отсутствуют терморесепторы поэтому клиент не чувствует тепла.

Радиочастотная терапия выполняется по гелю, содержащему липолитики и экстракт водорослей.



ДОСТОИНСТВА ВАКУУМНО-РОЛИКОВОГО МАССАЖА LUMICELL WAVE 6

Вакуумно-роликовая манипула Plarm Touch™ не имеет аналогов. Синергизм вакуумно-роликового массажа и инфракрасного луча способствует размягчению подкожно жировой клетчатки, улучшает кровообращение тканей, обеспечивает лимфодренаж и осуществляет детокс.

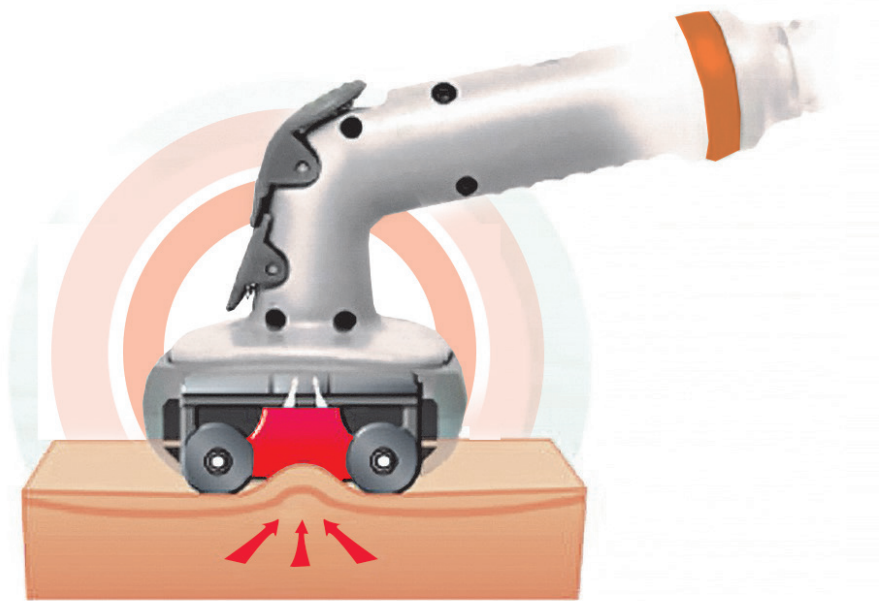

В отличие от других вакуумно-роликовых технологий, аппарат LumiCell Wave 6 не требует от пациента надевания эластичного процедурного костюма. Это сокращает время подготовки к массажу, повышает комфорт клиента и упрощает работу врача-косметолога.

LUMICELL WAVE 6 ИДЕАЛЕН ДЛЯ:

- ☑ салонов красоты и центров эстетической медицины: выравнивание контуров тела
- ☑ спа: выравнивание контуров тела, антистрессовые процедуры, расслабляющий массаж
- ☑ центров похудения, предлагающих упражнения и программы сбалансированного питания
- ☑ физиотерапевтических кабинетов и кабинетов лечебной физкультуры: терапевтический точечный массаж, снижающий мышечное напряжение и боль, улучшающий подвижность, воздействуя на фиброзные спайки
- ☑ клиник пластической хирургии: до- и постоперационное лечение (липосакция), ликвидирует последствия липосакции и ускоряет рассасывание отеков и гематом, что приводит к скорейшей реабилитации



ВЫРАЖЕННЫЕ И СТОЙКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



До



После



До



После



До



После



До



После

Курс процедур:

10 и более сеансов, два раза в неделю.
Рекомендуется повторный курс через месяц.

Время процедуры:

35-60 минут.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР

Курс лечения: Необходимо 10 или более сеансов (в зависимости от серьезности проблемы) дважды в неделю

Время: 35-60 минут (в зависимости от площади воздействия)

- ☑ Перед началом процедуры рекомендован пилинг всего тела.
- ☑ Используйте масло (416745) и насадку для **фотопневматического массажа** (30 минут или менее при работе над небольшой площадью).
- ☑ С помощью теплого влажного полотенца уберите остатки масла перед ультразвуковыми процедурами. Масло для фотопневматического массажа (416745) специально разработано для легкого устранения и не оставляет жирных следов, которые могут ослабить частоту ультразвука.
- ☑ Используйте гель для **ультразвуковых процедур** (416743). Ультразвуковую манипулу перемещайте медленными круговыми и линейными движениями, сосредотачиваясь на участках целлюлита и жировых отложений (не более 5 минут на участок).
- ☑ Очищать поверхность от геля после процедуры не обязательно, так как он совместим с гелем для радиоволновых процедур.
- ☑ Используйте гель (416744) и манипулы для **RF-терапии** для медленного массажа участков тела (не более 5 минут на участок). Во избежание болезненных ощущений, располагайте электроды плотно к поверхности кожи. Никогда не располагайте насадки под углом.
- ☑ Устраните гель теплым влажным полотенцем.
- ☑ Закончите процедуру легким ручным массажем, используя крем для похудения или подтяжки кожи.
- ☑ Используйте гель (416746) и манипулы для **безинъекционной мезотерапии**, медленно двигайтесь, скользящими движениями, обрабатывая 1 зону в течении 20 мин.
- ☑ По окончании сеанса удалите остатки геля влажным полотенцем.
- ☑ После процедуры рекомендуется отдохнуть на протяжении 5 минут.
- ☑ Пока пациент отдыхает, используйте это время для того, чтоб дать клиенту рекомендации.
- ☑ Наиболее эффективным будет применение комплексного подхода: сбалансированное питание, физические нагрузки, правильный питьевой режим и процедура на аппарате LUMICELL WAVE 6. Только сочетание этих факторов гарантируют впечатляющий результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220 / 230В – 50Герц
Предохранитель:	2 А SB
Размеры: Ширина Высота Глубина	58,4 см 167 см 58,4 см
Вес аппарата и базы:	57 кг
Материал:	Сталь и термоустойчивый кожух
Электроника:	Микропроцессорный контроллер
Вакуумная терапия: - Уровень вакуума - Максимальный уровень вакуума - Минимальный уровень вакуума - Режим вакуума	от 1 до 10 ед. (1 ед. = 6.772 кПа) 67,727 кПа 6,772 кПа Бесперывный
Ультразвуковая кавитация - Интенсивность - Шаг - Частота ультразвука	от 25 до 100 % 25 % 1 МГц
Радиочастотная терапия - Интенсивность - Шаг - Частота	20 до 100 % 20 % 450 кГц
Безинъекционная мезотерапия - Интенсивность - Шаг - Частота	от 1000мкА до 4000мкА 100мкА 450 кГц

Lumicell Wave 6 одобрен сертификатами UL, CSA (NRTL) и CE.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Москва, Москва-Сити, Пресненская набережная, 10, башня 3
(IQ апартаменты), 13 этаж, оф. 110
+7 495 128 09 20

www.hydraskin.ru